



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор увлажняющий для глаз и контактных линз «ХИЛАБАК»

Флакон АБАК - не содержит консервантов.

СОСТАВ:

Гиалуронат натрия 0,15 г.
Хлорид натрия, триметамол, кислота хлористоводородная,
вода для инъекций до 100 мл.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (название и адрес):

Лаборатуар Теа
12 ул. Луи Блерио
63017 Клермон-Ферран Седекс 2, Франция

ПОКАЗАНИЯ:

Раствор увлажняющий для глаз и контактных линз «ХИЛАБАК»

Рекомендовано использовать:

- для увлажнения глаз при ощущении сухости, усталости в результате воздействия таких внешних факторов, как ветер, пыль, дым, воздух кондиционера, при работе на компьютере, путешествиях на самолетах.
- лицам, пользующимся контактными линзами. Применение раствора облегчает процедуру надевания и снятия линз, делает их ношение более комфортным.

ХИЛАБАК, благодаря системе АБАК, гарантирует отсутствие консервантов. Поэтому он подходит для любого типа контактных линз, и является безопасным для тканей глаза.

ПРОДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- избегать контакта поверхности глаза и кончика флакона;
- не принимать внутрь.

Хранить в недоступном для детей месте.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

В случае совместного применения раствора ХИЛАБАК с другими офтальмологическими препаратами рекомендуется соблюдать паузу не менее 10 минут между закапыванием ХИЛАБАК а и применением других глазных капель.

ДОЗИРОВАНИЕ:

По одной капле в каждый глаз. Для лиц, пользующихся контактными линзами, по одной капле на каждую линзу при одевании и снятии. Частота закапывания устанавливается индивидуально, при необходимости можно пользоваться чаще в течение дня.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

СТЕРИЛЬНО

Следует придерживаться ряда предосторожностей для эффективного использования препарата:

- тщательно мыть руки перед применением;
- при закапывании избегать контактов кончика флакона с поверхностью глаза и кожей.



Слегка отведите пальцем нижнее веко, поднимите глаза вверх и закапайте одну каплю в конъюнктивный мешок (время появления капли из флакона ХИЛАБАК дольше, чем из традиционных флаконов). Закройте флакон после использования.

При одевании контактных линз: поместите одну каплю раствора в выпуклость линзы.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

При необходимости ХИЛАБАК можно закапывать чаще, чем один раз в течение дня.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

Слабая вероятность появления раздражения глаза при индивидуальной непереносимости компонентов раствора.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ:

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Хранить при температуре до 25°C. После вскрытия контейнера раствор следует использовать не более 8 недель.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04463 от 20.10.2020 г.

Представитель в РФ:

ООО «Теа Фарма»

115280 Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, эт 2, пом IV, ком 12,112

Тел.: +7 (495) 787 75 35